

CALBENIUM LIQUID

Disinfection product for dental unit



CALBENIUM® is een ontsmettingsmiddel voor watercircuits van tandheelkundige units.

De formule van CALBENIUM® is geschikt voor alle tandheelkundige units en tast interne onderdelen niet aan.

CALBENIUM® is een medisch hulpmiddel van klasse IIa met EC-markering, conform de eisen van de Europese richtlijn 93/42/EC

REFERENTIES

CHIRURGISCH

Referentie	Verpakking
2910.013	1 liter
2910.023	2 liter

FRUIT

Referentie	Verpakking
2910.012	1 liter
2910.022	2 liter

MUNT

Referentie	Verpakking
2910.011	1 liter
2910.021	2 liter

SAMENSTELLING

CALBENIUM® bevat: CTAB - EDTA - Chloramine - Bronidox – Ethylalcohol - Aspartaam - Allantoïne – Foamaster

FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

	CALBENIUM® Chirurgisch	CALBENIUM® Fruit	CALBENIUM® Munt
Verschijsnings vorm	Heldere, transparante vloeistof	Heldere, transparante vloeistof	Heldere, transparante vloeistof
pH	5 ± 0.5	5 ± 0.5	5 ± 0.5
Dichtheid	1,020 - 1,040	1,020 - 1,040	1,020 - 1,040





BEWAARVOORSCHRIFTEN

- Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren
- Het product verticaal opslaan
- Opslaan bij kamertemperatuur
- Vervaldatum voor opening: 2 jaar na datum van productie
- Bewaren na opening: 2 maanden na opening en terugzetten van de dop, of als het rechtstreeks aan een systeem is gekoppeld

WERKING VAN CALBENIUM®

CALBENIUM® 2% is effectief tegen *Pseudomonas Aeruginosa* en *Staphylococcus Aureus* (minimale vermindering 5 log¹⁰ UFC) na een contact van 5 min op 20°C conform de norm NF EN 1040:2006

CALBENIUM® 2% is effectief tegen *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas Aeruginosa*, *Enterococcus Hirae* en *L.pneumophila* na een contact van 60 min. op 20°C conform de norm NF EN 13727+A2:2015

CALBENIUM® 2% is effectief tegen *humaan coronavirus E229*, *adenovirus type 5* en *murine Norovirus* na een contact van 60 min op 20°C conform de norm NF EN 14476+A2 :2019

VOORZORGSMATREGELEN

- Draag een speciale veiligheidsbril tegen opspattend vocht.
- Draag geschikte beschermende handschoenen in geval van langdurig of herhaald contact met de huid.
- Bij contact met de ogen, spoelen met stromend water en een arts raadplegen.
- Bij contact met de huid, wassen met water.
- Niet weggooien in het milieu
- Kan een allergische reactie veroorzaken.

GEBRUIKSAANWIJZING

CALBENIUM® moet worden bewaard volgens de aanbevolen aanwijzingen voor opslag: kamertemperatuur gedurende maximaal 2 jaar. Na openen van de fles en wanneer hij opnieuw wordt afgesloten of als hij rechtstreeks aan een systeem is gekoppeld, kan het product nog maximaal 2 maanden worden bewaard bij kamertemperatuur.



Spoel CALBENIUM® niet weg in het riool, het product moet worden verwerkt door een erkend inzamelaar.

We adviseren gebruikers om regelmatig de microbiologische vervuiling van het water te controleren.

Verdunnen van CALBENIUM®

Het product moet tot 2% verdund worden: 20 ml zuiver product op 1 l water. Het tot 2% verdunde product kan in het riool worden weggespoeld. Als de fles helemaal leeg is of als de vervaldatum is verstreken, moet u het etiket op de fles laten. Breng de fles met inhoud naar een erkend inzamelaar.

Veiligheidssymbolen

Er staat een beschrijving van de pictogrammen in de handleiding en/of op het etiket van het product in de tabel hieronder:



Waarschuwing



medisch hulpmiddel van klasse IIa conform de eisen van de Europese richtlijn 93/42/EC

De vergunning voor de EC-markering is afgegeven door de bevoegde instantie SZUTEST



Lees de handleiding voor elk gebruik



Gegevens van de fabrikant van het medische hulpmiddel



Partijnummer



Productreferentie



Gevaar voor het milieu



Vervaldatum



Productiedatum

IFU versie 05 - Laatste wijziging op 14/10/2021

